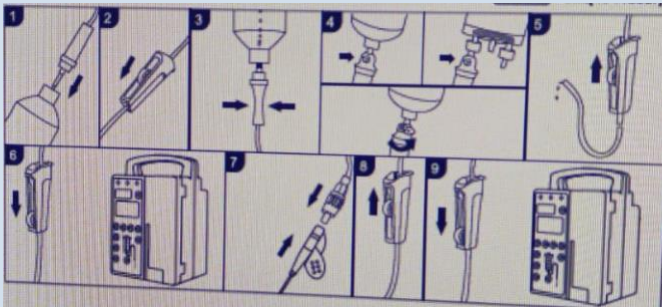


IMAGEN: 	<table> <tr> <td>PRODUCTO</td><td>SET DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION LIBRE DE AGUJA</td></tr> <tr> <td>REFERENCIA</td><td>BPQ-G</td></tr> <tr> <td>REGISTRO SANITARIO</td><td>INVIMA 2021DM-0024169</td></tr> <tr> <td>RIESGO</td><td>IIA</td></tr> </table>	PRODUCTO	SET DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION LIBRE DE AGUJA	REFERENCIA	BPQ-G	REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM-0024169	RIESGO	IIA
PRODUCTO	SET DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION LIBRE DE AGUJA								
REFERENCIA	BPQ-G								
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2021DM-0024169								
RIESGO	IIA								
USO - DESCRIPCIÓN	Los sets están diseñados para la administración o introducción en el cuerpo de soluciones líquidas de forma intravenosa con bomba de infusión, sin aguja. Puede usarse con Bombas de infusión de diferentes marcas cumpliendo los protocolos de calibración, en los equipos de infusión marca BEYOND ya está pre-configurado.								
CARACTERÍSTICAS	Período de vida útil: 3 años Forma de presentación: Por unidad y en caja de 100 unidades. Cada set es empaquetado individualmente estéril y luego colocado en cajas. Producto desechable de uso único por paciente Punta con / sin entrada de aire Cámara de goteo: 6ml / 12 ml / 14 ml Filtro de 15 μm 20 gotas / ml, 60 gotas / ml Tubo: Doble capa, 150 - 235 CM Conector Luer Lock (sin aguja) - Elaborado en silicona y PVC SIN DEHP - Puerto en Y para facilitar la aplicación de medicamentos. - Longitud 235 cm - Diámetro: 5mm - Presentación: Estéril - Método de Esterilización de fabrica: Producto estéril con Óxido de Etileno Instrucciones de uso - Cierre la llave por completo y prepare la infusión. - Retire la tapa de la punta e inserte la punta en el tapón de goma del envase. - Después de colgar el recipiente, apriete y libere la cámara de goteo, llene aproximadamente la mitad de la cámara de goteo. - Retire el tapón de conector de seguridad, realice el procedimiento de purga en el circuito (expulsar el aire). - Después de terminada la infusión, retire la punta del tapón de goma del envase. NO TOQUE DIRECTAMENTE. No lo use si las tapas de esterilidad de protección no están en su lugar. No almacenar a alta temperatura o humedad. 								
ALMACENAMIENTO	Temperatura: -20°C~+55°C, Humedad relativa: $\leq$ 93%, Presión atmosférica: 50.0kPa~106.0kPa								
PRESENTACIÓN	Unidad								