

IMAGEN: 	PRODUCTO	INFUSOR DE LIQUIDOS REUSABLE DE 1000 ML
	MARCA	SPACELABS - STATCORP
	REFERENCIA	1104SGA
	REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021280
	RIESGO	I
USO – DESCRIPCIÓN	El Infusor de líquidos a presión o chorro “UNIFUSOR” es reutilizable en color azul, con capacidad de 1000ml ideal para manejo de líquidos, con bolsa para colgar.	
CARACTERÍSTICAS	• Infusor a presión reutilizable de tela lavable para manejo de líquidos • Vejiga o bolsa interna en caucho • Manómetro aneroide hasta 300 mm Hg • Pera en caucho con válvula cromada de graduación dactilar. • Funda translúcida reforzada, que permite observar el nivel de líquido, con asa para colgar • Capacidad: 1000 ml	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Polímeros, PVC, Nylon libre de látex.	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -10-40°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
CUIDADOS	Si se presenta contaminación considerable del brazalete con sangre u otro fluido, se recomienda desecharlo. Instrucciones de limpieza: Realizar la limpieza con detergentes suaves y soluciones diluidas de cloro (de 1 a 2 %), limpie el brazalete con la solución, enjuague con agua y seque. Cualquier tipo de desinfección y limpieza debe realizarse a discreción y sujeto a la aprobación de los protocolos de cada Institución. Instrucciones de desinfección: Al utilizar una solución de desinfección como Enzol, Cidezyme, Cidex, sporicidina, alcohol isopropílico (70 %) o etanol (70 %), limpie o atomice el brazalete en su totalidad y deje que se asiente completamente durante aproximadamente un minuto. Luego enjuague bien con agua y seque. <i>No limpie la superficie del manómetro con disolventes ya que podrían dañar la lente.</i> Nota: Si se sumerge el infusor, todas las conexiones deben cubrirse para mantener los fluidos fuera del brazalete. PRECAUCIÓN: • NO conecte el sistema de inflado a la línea invasiva del paciente. • El funcionamiento previsto del Unifusor es el inflado manual mediante el uso del bulbo manual. • La manipulación brusca o el uso excesivo pueden afectar a la exactitud del indicador. • Confirme la calibración del indicador antes de usarlo.	
PRESENTACIÓN	Unidad.	