

IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS CONECTOR LL/ PHILIPS X 3 TIPO BROCHE																			
	MARCA		UNIMED																			
	REFERENCIA		AA3-90S																			
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1																			
	RIESGO		IIA																			
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.																				
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.																				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		<table><tr><td>Conector</td><td>BROCHE/ Tipo LL</td></tr><tr><td>Derivadas</td><td>3</td></tr><tr><td>Compatible con:</td><td></td></tr><tr><td>Longitud del cable:</td><td>0.9M</td></tr><tr><td>Diámetro del cable</td><td>2.6mm</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>0.64g</td></tr><tr><td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr><tr><td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr><tr><td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr></table>			Conector	BROCHE/ Tipo LL	Derivadas	3	Compatible con:		Longitud del cable:	0.9M	Diámetro del cable	2.6mm	Peso:	0.64g	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
		Conector	BROCHE/ Tipo LL																			
		Derivadas	3																			
		Compatible con:																				
		Longitud del cable:	0.9M																			
		Diámetro del cable	2.6mm																			
		Peso:	0.64g																			
		Autoclavable:	No																			
		Temp. Operación:	5°C a 45°C																			
		Humedad operación:	0 a 80% No condensada																			
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU																				
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																				
PRESENTACIÓN		Unidad.																				
RECOMENDACIONES		Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso.																				

- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.