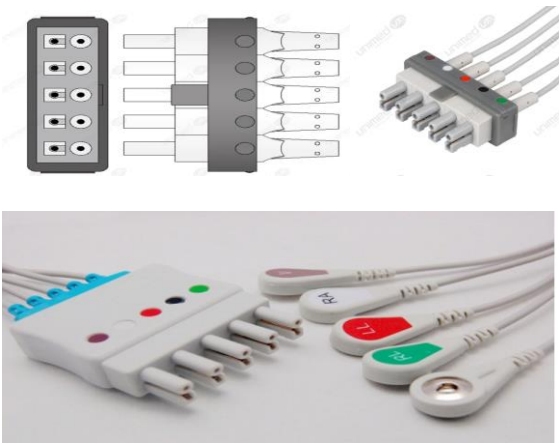


IMAGEN: 	PRODUCTO LEADS CONECTOR LL/ PHILIPS X 5 TIPO BROCHE	
	MARCA UNIMED	
	REFERENCIA AA5-90S	
	REGISTRO SANITARIO 2019DM-0004316-R1	
	RIESGO IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.	
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	BROCHE/ Tipo LL
	Derivadas	5
	Compatible con:	
	Longitud del cable:	0.9M
	Diámetro del cable	2.6mm
	Peso:	0.64g
	Autoclavable:	No
	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso.	

- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.