

IMAGEN: 	PRODUCTO	MÁSCARA LARÍNGEA CLÁSICA REUSABLE N°1.5
	MARCA	MENHER
	REFERENCIA	CLMA1.5R LM-MLWL1.5
	REGISTRO SANITARIO	2017DM-0016882
	RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	La máscara laríngea se usa principalmente para pacientes con anestesia general, departamento de emergencias, UCI y otros departamentos de primeros auxilios y pacientes de reanimación, pacientes con vías respiratorias difíciles, aplicados en cirugía de anestesia general, la LMA es un medio eficaz para establecer una vía aérea segura.	
CARACTERÍSTICAS	La máscara laríngea está fabricada en silicona reforzada de grado médico. Las partes básicas son: manguito de silicona, tubo de ventilación, tubo inflable, globo indicador, válvula unidireccional y articulación. Este producto es adecuado para establecer ventilación artificial en pacientes sometidos a anestesia general y reanimación de emergencia, o para pacientes que necesitan ventilación artificial a corto plazo, ideal para manejo de vía aérea difícil. Características del producto: 1. Adecuado para esterilización en autoclave. 2. Reutilizable hasta 40 veces, cumpliendo los protocolos de uso. Cuenta con tarjeta de control que incluye número de serie rastreable. 3. Elaborado en silicona grado médico, con resorte de acero inoxidable. 4. Barra protectora para seguridad del paciente.	
ESTERILIZACIÓN	El único método de esterilización recomendado es en autoclave a vapor. Desinfla el manguito por completo antes de esterilizar. No exceda la temperatura de 134°C en el autoclave. El tiempo mínimo de esterilización debe ser entre 10 a 15 minutos cuando está envuelto, y 10 minutos sin envolver. Si utiliza autoclave de prevacío el tiempo de exposición debe ser entre 3 y 4 minutos. Después de autoclavar deje enfriar a temperatura ambiente antes de usar.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Temperatura de operación: 5-40°C Humedad de operación: 0-80% Humedad relativa no condensada Tipo de paciente: de peso entre 5 y 10 Kg Diámetro Interno: 5.0 mm Diámetro externo: 8.3 mm Longitud: 83 mm Máximo volumen de Insuflación: 4 ml	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Silicona grado médico.	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -10-40°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	