

IMAGEN: 	PRODUCTO	LEADS UNIVERSAL X 3 TIPO PINZA	
	MARCA	UNIMED	
	REFERENCIA	D3-90P	
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1	
	RIESGO	IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.		
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Juego de leads tipo clip Adulto/pediátrico, conector DIN de1.5mm, AHA		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	PINZA/ Pin Sencillo Tipo DIN	
	Derivadas	3	
	Compatible con:	Todas las marcas	
	Longitud cable:	del	0.9M
	Diámetro cable	del	2.6mm
	Peso:	0.64g	
	Autoclavable:	No	
	Temp. Operación:	5°C a 45°C	
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		
RECOMENDACIONES	Mantenimiento:		
	- El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso.		

- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.