

IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS UNIVERSAL X 3 TIPO BROCHE
	MARCA		UNIMED
	REFERENCIA		D3-90S
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.	
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Conector	BROCHE/ Pin Sencillo Tipo DIN
		Derivadas	3
		Compatible con:	Todas las marcas
		Longitud del cable:	0.9M
		Diámetro del cable	2.6mm
		Peso:	0.64g
		Autoclavable:	No
		Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada	
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN		Unidad.	
RECOMENDACIONES		Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso.	

- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.