

IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS UNIVERSAL X 5 TIPO PINZA		
	MARCA		UNIMED		
	REFERENCIA		D5-90P		
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1		
	RIESGO		IIA		
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.			
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Juego de leads tipo pinza Adulto/pediátrico, conector DIN de 1.5mm, AHA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Conector		PINZA/ Pin Sencillo Tipo DIN	
		Derivadas		5	
		Compatible con:		Todas las marcas	
		Longitud del cable:		0.9M	
		Diámetro del cable		2.6mm	
		Peso:		0.64g	
		Autoclavable:		No	
		Temp. Operación:		5°C a 45°C	
		Humedad operación:		0 a 80% No condensada	
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU			
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada			
PRESENTACIÓN		Unidad.			
RECOMENDACIONES		Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.			

- Permita que el cable se seque antes de su uso.
- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.