

IMAGEN: 	PRODUCTO	MASCARA ORONASAL ADULTO "FULL FACE"
	MARCA	RESPIRCARE
	REFERENCIA	FM-1L
	REGISTRO SANITARIO	2018DM-0018754
	FABRICANTE	RMS MEDICAL TECH CO., LTD
	RIESGO	IIA
USO – DESCRIPCIÓN	La mascarilla facial FM-1 canaliza el flujo de aire de forma no invasiva al paciente desde un dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias, como CPAP, BIPAP o BILEVEL sistema de dos niveles. Recomendada para uso en pacientes adultos (> 66 lb / 30 kg) para quienes se ha prescrito terapia de presión en las vías respiratorias. Es un producto recomendado para ser usado por un solo paciente en el entorno doméstico. Para uso en entornos hospitalarios, si se cambia de paciente, es estrictamente necesario que la mascarilla sea esterilizada junto con todo el juego de mascarillas y accesorios. Hasta 30 Reúsos. Para el almacenamiento prolongado de la mascarilla, también se recomienda esterilizar Diariamente / después de cada uso • Desmonte los componentes de la mascarilla de acuerdo con las instrucciones de desmontaje. • Limpie a fondo los componentes separados de la mascarilla (excluyendo el arnés), frotando suavemente con agua tibia (aprox.30 ° C) usando un jabón suave. • Utilice un cepillo de cerdas suaves para limpiar el tubo de ventilación. • Enjuague bien todos los componentes con agua potable y deje secar al aire libre de la luz solar directa. • Cuando todos los componentes estén secos, vuelva a ensamblar de acuerdo con las instrucciones de reensamblaje. Desinfección: 1. Después de limpiar la mascarilla siguiendo los procedimientos que se muestran arriba, limpie todas las partes de la mascarilla dos veces con alcohol al 75%. 2. Enjuague la mascarilla con agua potable y asegúrese de eliminar completamente el desinfectante o detergente. Seque toda la mascarilla a la sombra. Siga las instrucciones del manual. Semanal Lavar a mano el arnés y todos los componentes en agua tibia (aprox. 30 ° C) use agua con jabón. Use jabón puro. Enjuague bien los componentes y déjelos secar al aire libre de la luz solar directa.	
CARACTERÍSTICAS	La máscara es cómoda, flexible y silenciosa. Está diseñado para minimizar el contacto con la cara, asegurando así que el confort durante la terapia. Incluye Arnés	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	• El espacio muerto de la máscara varía según el tamaño de los cojines, pero es inferior a 218 ml. • Presión en terapia: 3 a 40 cm H₂O • Resistencia; Caída de presión medida (promedio para 3 tamaños) a 50 L / min: 0.15 cmH₂O • a 100 L / min: 0.5 cmH₂O • Resistencia inspiratoria (en combinación con válvula de no reinspiración): 1,8 cmH₂O a 50 L/min. • Resistencia espiratoria (en combinación con válvula de no reinspiración): 2,0 cmH₂O a 50 L/min • La válvula de no reinhalación se abre a presión atmosférica de 1.0 cmH₂O • Sonido: valores de emisión de ruido de número dual declarados de acuerdo con ISO 4871. • El nivel de potencia acústica ponderado de la máscara es inferior a 28dBA, con incertidumbre 3 dBA. • Los niveles de presión de sonido ponderado de la máscara a una distancia de 1 m son de 20 dBA, con incertidumbre de 3 dBA. • La máscara no contiene ninguna sustancia peligrosa y puede desecharse con los desechos domésticos normales. • Temperatura de funcionamiento: + 5 ° C a + 40 ° C (41 ° F a 104 ° F) • Humedad de funcionamiento: 0% ~ 96% de humedad relativa sin condensación
MATERIAL / COMPOSICIÓN	PVC y silicona grado médico
ALMACENAMIENTO	Asegúrese de que la máscara esté completamente limpia y seca antes de guardarla por un período de tiempo prolongado. Guarde la mascarilla en un lugar seco y fuera del alcance directo de la luz de sol. Almacenamiento y transporte: -20 ° C a + 55 ° C (-4 ° F a 131 ° F) Humedad de almacenamiento y transporte: 0% ~ 96% de humedad relativa sin condensación
PRESENTACIÓN	Unidad