

IMAGEN: 		PRODUCTO	LEADS DATASCOPE/ MINDRAY X 5 TIPO BROCHE		
		MARCA	UNIMED		
		REFERENCIA	MR5-90S		
		REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1		
		RIESGO	IIA		
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.			
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Conector	BROCHE/ Tipo LL		
		Derivadas	5		
		Compatible con:	Datascope Expert, Passport 2, Passport 2LT, Passport XG, Spectrum, Trio, Mindray PM 5000, PM 6000, BeneView T5, BeneView T5/T8, Beneheart D6, iPM-9800, MEC 1000		
		Longitud del cable:	0.9M		
		Diámetro del cable	2.6mm		
		Peso:	0.64g		
		Autoclavable:	No		
		Temp. Operación:	5°C a 45°C		
		Humedad operación:	0 a 80% No condensada		
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU			
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada			
PRESENTACIÓN		Unidad.			
RECOMENDACIONES		Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.			

- Permita que el cable se seque antes de su uso.
- No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70%
- No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.