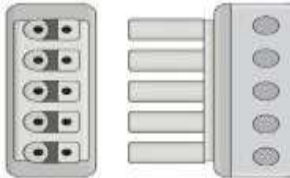


IMAGEN:  	PRODUCTO LEADS DESMONTABLE DATASCOPE/ MINDRAY X 5 TIPO BROCHE	
	MARCA UNIMED	
	REFERENCIA MRC5-90S	
	REGISTRO SANITARIO 2019DM-0004316-R1	
	RIESGO IIA	
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.	
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	BROCHE / Tipo LL
	Derivadas	5
	Compatible con:	Datascope Expert, Passport 2, Passport 2LT, Passport XG, Spectrum, Trio, Mindray PM 5000, PM 6000, BeneView T5, BeneView T8, Beneheart D6, iPM-9800, MEC 1000
	Longitud del cable:	0.9M
	Diámetro del cable	2.6mm
	Peso:	0.64g
	Autoclavable:	No
	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	

RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.
------------------------	---