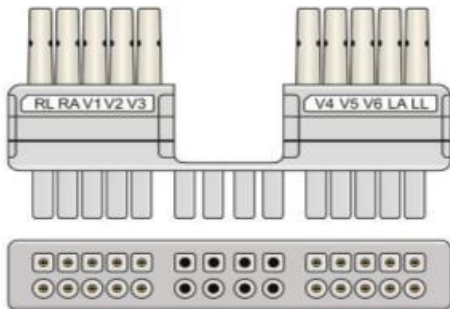


IMAGEN: 	PRODUCTO		SET DE DERIVADAS DE EKG PARA ELECTROCARDIOGRAFO																
	MARCA		UNIMED																
	REFERENCIA		MT10-LB																
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1																
	RIESGO		IIA																
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.																		
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Cable de cobre estañado con conector, terminales tipo Banana Medición de alta precisión Fácil de usar y conectar Duradero Cables reutilizables de alta calidad La temperatura de funcionamiento varía de 10 ° a 35 ° C (50 ° a 95 ° F) Cumple con la American Heart Association (AHA) Marcado CE Materiales libres de contaminantes ambientales (caucho de látex natural) utilizados																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<table><tr><td>Conector</td><td>Tipo Banana</td></tr><tr><td>Compatible con:</td><td>ELI 150C, ELI 230, ELI 250C, ELI 280, ELI 350AM12 (9293-048-54), Wireless Acquisition Module (WAM)</td></tr><tr><td>Longitud del cable:</td><td>1 M</td></tr><tr><td>Longitud de derivadas</td><td>Bipolares: 1.2m; Precordiales 0.8m</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>0.73kg</td></tr><tr><td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr><tr><td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr><tr><td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr></table>			Conector	Tipo Banana	Compatible con:	ELI 150C, ELI 230, ELI 250C, ELI 280, ELI 350AM12 (9293-048-54), Wireless Acquisition Module (WAM)	Longitud del cable:	1 M	Longitud de derivadas	Bipolares: 1.2m; Precordiales 0.8m	Peso:	0.73kg	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
Conector	Tipo Banana																		
Compatible con:	ELI 150C, ELI 230, ELI 250C, ELI 280, ELI 350AM12 (9293-048-54), Wireless Acquisition Module (WAM)																		
Longitud del cable:	1 M																		
Longitud de derivadas	Bipolares: 1.2m; Precordiales 0.8m																		
Peso:	0.73kg																		
Autoclavable:	No																		
Temp. Operación:	5°C a 45°C																		
Humedad operación:	0 a 80% No condensada																		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU																		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																		

PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.