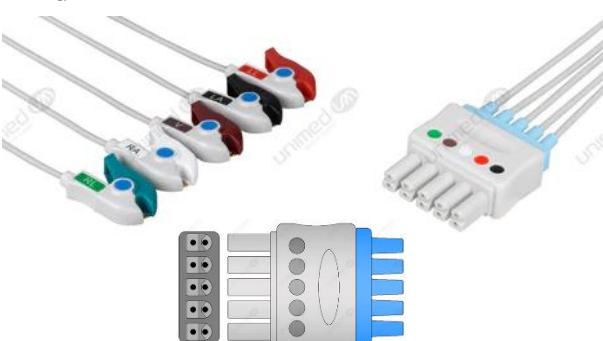


IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS SIEMENS X 5 TIPO PINZA
	MARCA		UNIMED
	REFERENCIA		SM5-90P
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.	
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	PINZA / Tipo LL	
	Derivadas	5	
	Compatible con:	Draeger/Dräger SC 5000/6000/7000/8000/9000 – Draeger/Siemens Polymed, Sirem, Sirecust 1200/1260/1801/341 /400/500/600/610/620/630/ 700/720/722/730/732/900/960/ 961 – DRE ASM6000, Trax, Vida, Waveline – Fukuda Denshi DSL-8001, DS-8005/8007/8100/8200/8400/8500/7000/7100/7200/ 7300 – Infinium Mira, Vega – Kontron 7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KSLT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon – Schiller TRUSCOPE ULTRA Q3/Q5/Q7, ELITE A3/A5, Defigard 5000/4000 – Skanray>Larsen & Toubro Cosmic, Galaxy, Planet, Planet 50, Star 50, Star 55, Stellar P.	
	Longitud del cable:	1M	
	Diámetro del cable	2.6mm	
	Peso:	0.64g	
	Autoclavable:	No	
	Temp. Operación:	5°C a 45°C	
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada	
	MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.		
	Precauciones:		

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas.- Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule. |
|--|--|