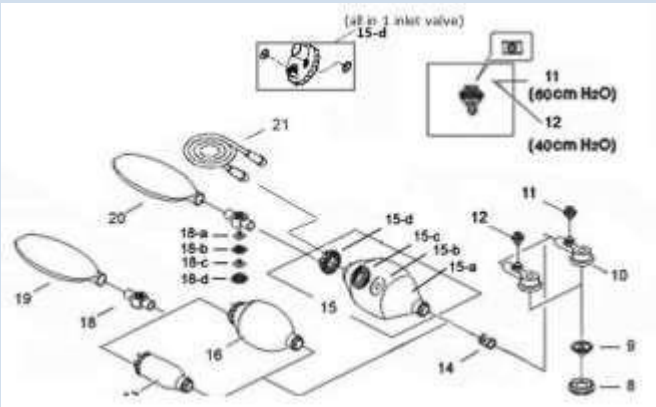


IMAGEN: 	PRODUCTO	AMBU- RESUCITADOR SILICONA REUSABLE ADULTO CON VALVULA PEEP
	MARCA	WINNER
	REFERENCIA	TW8111 C/V
	REGISTRO SANITARIO	2020DM-0021444
	FABRICANTE	XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	El Resucitador Está Destinado A La Reanimación Pulmonar. El Reanimador Se Puede Usar Normalmente Para Un Suministro Continuo De Oxígeno Y Ventilación Asistida.
--------------------------	---

CARACTERÍSTICAS	El producto es aplicable para la reanimación pulmonar y ayudando a la respiración manual, el paciente puede mantener la respiración normal por un corto tiempo antes de la reanimación. Se puede usar individualmente sin fuente de oxígeno comprimido, y el equipo eléctrico no es necesario; especialmente si el estado de una enfermedad es emergente.  Nota: El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características</th><th>Adulto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso corporal</td><td>≥33kg</td></tr> <tr> <td>Volumen sistólico</td><td>800 ml</td></tr> <tr> <td>Volumen de reanimación</td><td>1630ml</td></tr> <tr> <td>Dimensiones (longitud × diámetro)</td><td>325×132mm</td></tr> <tr> <td>Peso del reanimador</td><td>600 g</td></tr> <tr> <td>Válvula limitadora de presión</td><td>60 cmH2O</td></tr> <tr> <td>Espacio muerto (válvula del paciente)</td><td>7 ml</td></tr> <tr> <td>Resistencia inspiratoria</td><td>5 cmH2O (at 50 L/min)</td></tr> </tbody> </table>	Características	Adulto	Peso corporal	≥33kg	Volumen sistólico	800 ml	Volumen de reanimación	1630ml	Dimensiones (longitud × diámetro)	325×132mm	Peso del reanimador	600 g	Válvula limitadora de presión	60 cmH2O	Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml	Resistencia inspiratoria
Características	Adulto																	
Peso corporal	≥33kg																	
Volumen sistólico	800 ml																	
Volumen de reanimación	1630ml																	
Dimensiones (longitud × diámetro)	325×132mm																	
Peso del reanimador	600 g																	
Válvula limitadora de presión	60 cmH2O																	
Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml																	
Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)																	

	Resistencia espiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
	Volumen del depósito de la bolsa	2000 ml
	Conector de paciente	ISO Ø22/15 mm
	Temperatura de funcionamiento recomendada:	-18 C° ~ +50 C°
	Almacenamiento	-40C° ~ +60 C°
Limpieza y desinfección 1. El resucitador manual debe limpiarse y desinfectarse siempre que el resucitador se contamine. 2. Desmontaje: verifique las instrucciones de uso 3. Con todas las partes se puede usar óxido de etileno. 4. El resucitador manual (excepto el tubo de oxígeno y la bolsa del depósito) se lava con agua jabonosa al 0.2% durante 30 minutos y se enjuaga con agua limpia. Seque todos los componentes. Luego haga el montaje y pruebe (Ver: Prueba de funcionamiento correcto) 5. Autoclavable (solo para resucitador manual de silicona) 6. El resucitador de silicona (excepto el tubo de oxígeno y la bolsa del depósito) se puede esterilizar en autoclave 121 °C. NOTA: El resucitador de silicona se recomienda reutilizar no más de 20 veces. 7. El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables. Incluye: Válvula PEEP El reanimador cumple con la norma ISO 10651-4. También se ajusta a la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / EEC sobre dispositivos médicos		
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Cuerpo principal SILICONA	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de Almacenamiento: -40C° ~ +60 C°, Temperatura de funcionamiento recomendada: -18 C° ~ +50 C° Humedad relativa: ≤93%,	
PRESENTACIÓN	Unidad	