

IMAGEN:

PRODUCTO
**AMBU- RESUCITADOR SILICONA
REUSABLE ADULTO**
MARCA

WINNER

REFERENCIA

 TW8111
S/V

REGISTRO SANITARIO

2020DM-0021444

FABRICANTE

XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD

RIESGO

IIA


USO - DESCRIPCIÓN

El Resucitador Está Destinado A La Reanimación Pulmonar. El Reanimador Se Puede Usar Normalmente Para Un Suministro Continuo De Oxígeno Y Ventilación Asistida.

CARACTERÍSTICAS

El producto es aplicable para la reanimación pulmonar y ayudando a la respiración manual, el paciente puede mantener la respiración normal por un corto tiempo antes de la reanimación.

Se puede usar individualmente sin fuente de oxígeno comprimido, y el equipo eléctrico no es necesario; especialmente si el estado de una enfermedad es emergente.

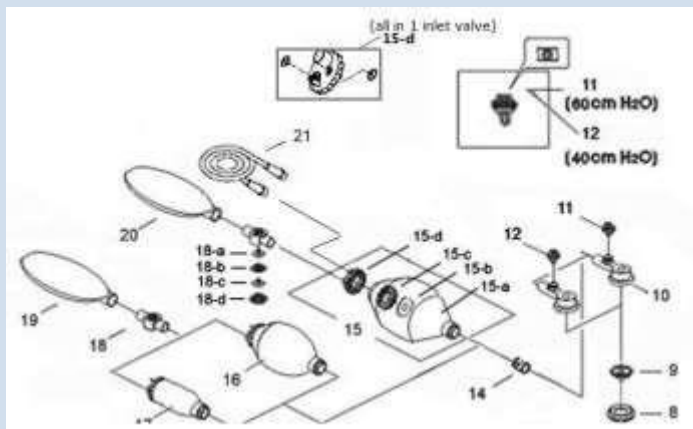

Nota: El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables.

Características	Adulto
Peso corporal	≥33kg
Volumen sistólico	800 ml
Volumen de reanimación	1630ml
Dimensiones (longitud × diámetro)	325×132mm
Peso del reanimador	600 g
Válvula limitadora de presión	60 cmH2O
Espacio muerto (válvula del paciente)	7 ml
Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)

CONTACTO

Calle 85A # 49A- 64 PBX: (1) 5334444 - FAX: (1) 5334047 comercial@hospitecnica.com.co Bogotá -Colombia.

		Resistencia espiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
		Volumen del depósito de la bolsa	2000 ml
		Conector de paciente	ISO Ø22/15 mm
		Temperatura de funcionamiento recomendada:	-18 C° ~ +50 C°
		Almacenamiento	-40C° ~ +60 C°
	Limpieza y desinfección		
	1. El resucitador manual debe limpiarse y desinfectarse siempre que el resucitador se contamine.		
	2. Desmontaje: verifique las instrucciones de uso		
	3. Con todas las partes se puede usar óxido de etileno.		
	4. El resucitador manual (excepto el tubo de oxígeno y la bolsa del depósito) se lava con agua jabonosa al 0.2% durante 30 minutos y se enjuaga con agua limpia. Seque todos los componentes. Luego haga el montaje y pruebe (Ver: Prueba de funcionamiento correcto)		
	5. Autoclavable (solo para resucitador manual de silicona)		
	6. El resucitador de silicona (excepto el tubo de oxígeno y la bolsa del depósito) se puede esterilizar en autoclave 121 °C.		
	NOTA: El resucitador de silicona se recomienda reutilizar no más de 20 veces.		
	7. El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables.		
	El reanimador cumple con la norma ISO 10651-4. También se ajusta a la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / EEC sobre dispositivos médicos		
	MATERIAL / COMPOSICIÓN	Cuerpo principal SILICONA	
	ALMACENAMIENTO	Temperatura de Almacenamiento: --40C° ~ +60 C° , Temperatura de funcionamiento recomendada: -18 C° ~ +50 C° Humedad relativa: ≤93%,	
	PRESENTACIÓN	Unidad	