

IMAGEN:			
A MONITOR	A SENSOR		
			
		PRODUCTO	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2
		MARCA	UNIMED
		REFERENCIA	U708-68
		REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1
		RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo		
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Nicolay 12 pines/ DB9	
	Compatible con:	BLT M7000, M900, M7000, M9500, A8 MODULAR Sinohero S70 Venni VI-8080	
	Longitud del cable:	2.1M	
	Diámetro del cable	4.0mm	
	Peso:	0.54kg	
	Autoclavable:	No	
	Temp. Operación:	5°C a 45°C	
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.		

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.