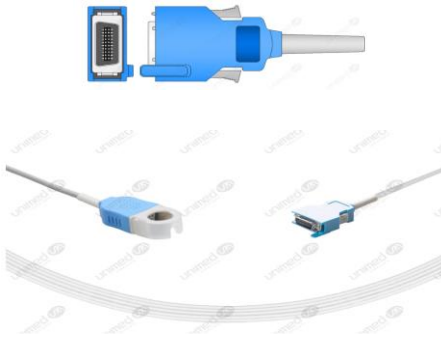


IMAGEN: 	EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2	
	PRODUCTO	
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	U710-106
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1
	RIESGO	IIA
USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo	
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Conector	Rectángulo 20- pin SCSI / DB9
	Compatible con:	Nihon Kohden OPV1500 LifeScope N, OPV1500; OPV 1500K LifeScope N (OEM: JL-302T)
	Longitud del cable:	2.2 M
	Diámetro del cable	4.0mm
	Peso:	0.54kg
	Autoclavable:	No
	Temp. Operación:	5°C a 45°C
	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU	
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada	
PRESENTACIÓN	Unidad.	
RECOMENDACIONES	Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.	

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.